




Alpha-Stim® M CON TE

per il controllo del
dolore cronico, acuto
e post-operatorio

In aggiunta alla
gestione di ansia,
insonnia e depressione

comincia a vivere...DI NUOVO™

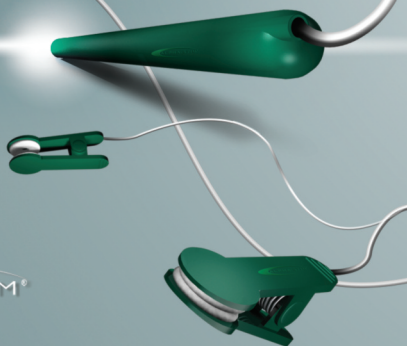


ALPHA-STIM®

I veterani scelgono Alpha-Stim® 3 volte su 4

I veterani di guerra, che provano un notevole dolore che esula la comprensione della maggior parte delle persone, scelgono Alpha-Stim® 3 volte su 4. In uno studio effettuato presso il Veterans Affairs Medical Center di Michael E. DeBakey, a Houston, in Texas, l'Alpha-Stim® è stato scelto il 73% delle volte dai veterani sofferenti di dolore cronico, dopo che è stato mostrato loro come utilizzare cinque diverse opzioni medicali.¹

Dispositivi CAM scelti da veterani nell'arco di 197 visite di gruppo

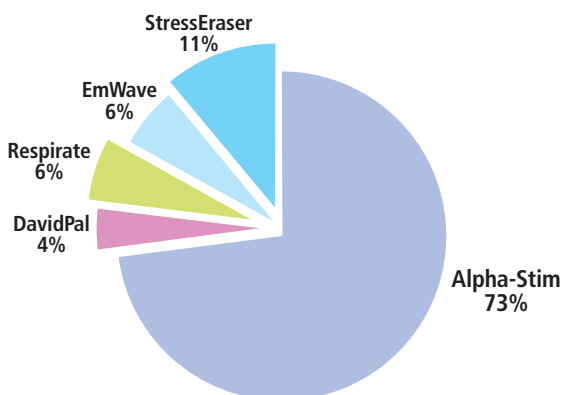

Perché i veterani hanno preferito Alpha-Stim® per alleviare il dolore – Più veloce, più sicuro, più efficace

L'Alpha-Stim® utilizza l'elettroterapia a microcorrente (MET) per chi soffre di dolore acuto, cronico o post-operatorio e la stimolazione elettroterapica craniale (CES) per l'ansia, l'insonnia e la depressione. La forma d'onda esclusiva della microcorrente della tecnologia Alpha-Stim® produce risultati residuali e cumulativi: ciò comporta che il sollievo duri nel tempo e sia possibile riprendere le normali attività.

L'Alpha-Stim® è un dispositivo medico a microcorrenti unico ed efficace. La ricerca a supporto dell'Alpha-Stim® è maggiore rispetto a qualsiasi altro dispositivo terapeutico

1. Tan, Gabriel, Dao, Tam K., Smith, Donna L., Robinson, Andrew and Jensen, Mark P. Incorporating Complementary and Alternative Medicine (CAM) Therapies to Expand Psychological Services to Veterans Suffering From Chronic Pain. *Psychological Services*. 7(3):148-161, 2010.

del suo genere, e ancor più della maggior parte dei prodotti farmaceutici. Sviluppato nel 1981 dal dott. Daniel L. Kirsch, l'Alpha-Stim® ha alleviato l'ansia, l'insonnia e la depressione di milioni di persone in tutto il mondo, anche quando questi ultimi si sono ritrovati delusi da altre terapie.

Per vostra fortuna, lo stesso Alpha-Stim® che viene utilizzato da soldati e veterani, è ora disponibile anche per voi. Quindi, se siete in cerca di sollievo dal dolore, chiedete informazioni al vostro medico curante circa la prescrizione dell'Alpha-Stim. Qualora viviate fuori dagli Stati Uniti, non è necessaria alcuna prescrizione medica.

Più veloce

L'Alpha-Stim® tratta il dolore nel giro di due-cinque minuti utilizzando delle sonde tramite una semplice procedura che generalmente produce una significativa riduzione del dolore. Una volta appreso il funzionamento di base del trattamento, le quattro semplici operazioni che costituiscono la procedura possono essere applicate a qualsiasi parte del corpo.

Più sicuro

L'Alpha-Stim® apporta risultati terapeutici duraturi senza i rischi di pericolosi effetti collaterali, di tolleranza o assuefazione e può essere utilizzato anche in aggiunta alla terapia farmacologica. Dopo il trattamento, l'Alpha-Stim® consente di riprendere le normali attività quotidiane ed è adatto per uso ambulatoriale o domiciliare.

Più efficace


È stato sottoposto un sondaggio a 2.500 pazienti facenti uso di stimolazione elettroterapica craniale e MET per il trattamento del dolore.² Nove persone su 10 hanno riscontrato un sollievo significativo con un miglioramento di almeno il 25%, a prescindere dalla causa del dolore. I risultati sono riportati nella tabella presente nella pagina seguente.

Cos'è l'Alpha-Stim® e come funziona?

L'Alpha-Stim® è un dispositivo elettromedicale clinicamente testato che allevia il dolore, l'ansia, la depressione e contribuisce a promuovere un sonno migliore utilizzando la tecnologia delle microcorrenti.

2. Kirsch, Daniel L. *The Science Behind Cranial Electrotherapy Stimulation* (2nd Ed), Medical Scope Publishing Corporation, Edmonton, Alberta, Canada, 2002.

Percentuale di pazienti che hanno riscontrato un sollievo significativo

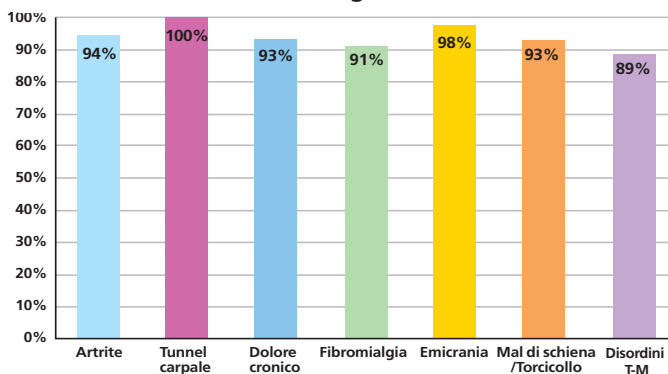

L'Alpha-Stim® genera una forma d'onda unica ed esclusiva che nessun altro dispositivo è in grado di offrire. Così come le pillole non sono tutte uguali, l'unicità della forma d'onda dell'Alpha-Stim® produce risultati molto diversi dai suoi concorrenti. A differenza dei farmaci che vengono introdotti all'interno del vostro corpo in forma chimica e poi ripartiti in componenti più piccoli come gli elettroni, l'Alpha-Stim® inizia proprio al livello degli elettroni, consentendo alle cellule del corpo di tornare allo stato di funzionamento naturale. L'Alpha-Stim® produce velocemente un sollievo cumulativo e duraturo, permettendo di riprendere le normali attività quotidiane.

Testimonianze

Anni di dolore, scomparsi in qualche minuto...

"Ho usato l'Alpha-Stim® su molte zone diverse e adoro il modo tramite cui posso far placare, e a volte scomparire, il dolore con un trattamento. Per lo più, uso l'Alpha-Stim® con la clip alle orecchie quando sono in tensione e mi si irrigidiscono i muscoli del collo e della testa, mi scoppiano i nervi della testa, e sto molto male. Mi basta collegare l'Alpha-Stim® con le clip alle orecchie e dolore e tensione scompaiono."

– Peggyann Collins

"L'Alpha-Stim® mi ha cambiato la vita. Dopo dieci anni di dolore cronico invalidante, riesco a camminare, dormire e funzionare di nuovo. Sono uscito da un programma di gestione del dolore di dieci settimane con molte tecniche e strumenti per migliorare la qualità della vita, e

l'Alpha-Stim® è il migliore di tutti. Ho avuto risultati tangibili subito dopo il primo trattamento.

Avevo lesioni che spaziavano da trauma cranico a molteplici problemi articolari e dei tessuti molli. Mi sento rinato e ora ho l'energia e la speranza di poter tornare nuovamente produttivo. Ora che ho un Alpha-Stim® la qualità della mia vita è tornata nelle mie mani. Mai più torpore da farmaco, né spirale di effetti collaterali negativi. Mi sento benedetto."

– Justin Powers

"Il dolore era alle stelle. Per tre mesi, sono stato quasi sempre a letto. Ho iniziato a usare l'Alpha-Stim® per tre sessioni di un'ora alla settimana. Dopo due settimane, il gonfiore si era alleviato. Sono andata a ballare per la prima volta da più di un anno. Adesso corro tre chilometri al giorno. Mi sento miracolata, ma anche arrabbiata col mio dottore, che non conosceva l'Alpha-Stim®. Se avesse saputo della tecnologia del dott. Kirsch, lo scorso anno avrei potuto vivere con molto meno dolore."

– Nancy Eichhorn

"Sono soggetto a dolore da arto fantasma per un'amputazione della gamba destra sopra il ginocchio. Ho anche molte ostruzioni nella gamba sinistra. Ho tentato molte vie per risolvere il problema, ma tutte senza successo: provavo estremo dolore ogni giorno. Negli ultimi tre mesi ho usato l'Alpha-Stim® e ne sto traendo moltissimo sollievo. A volte lo uso 2-3 volte al giorno, altre volte non lo uso affatto. Mi sono reso conto che il sollievo maggiore si presenta quando lo uso sulle orecchie... è davvero rilassante. Così riesco a tollerare il dolore ed è molto più bello starci intorno. Da quando il dolore è diminuito, la vita di mia moglie è meno stressante e il mio stato d'animo è migliore. A maggio ho attraversato il Paese in aereo e non riuscivo a rilassarmi per la tensione, così ho usato l'Alpha-Stim® collegandolo alle orecchie. Mi sono rilassato mi sono addormentato e mi sono goduto il viaggio. Raccomanderei l'uso dell'Alpha-Stim® a chiunque. Mi ha aiutato a provare meno dolore e godermi la vita quotidiana."

– Alan J. Mand

L'Alpha-Stim® è sicuro?

Ci sono 55 studi di ricerca e rapporti pubblicati, ricerche costanti, sondaggi sottoposti a pazienti e approvazioni professionali, il tutto a sostegno della sicurezza e l'efficacia dell'Alpha-Stim®. In oltre tre decenni di studi che hanno coinvolto circa 8.800 persone, sono stati rilevati soltanto effetti collaterali minori e autolimitanti, di cui i due più comuni sono stati mal di testa (0,10%) e reazioni cutanee nei punti di applicazione degli elettrodi (0,07%). Per 9 persone su 10 che la usano, la tecnologia Alpha-Stim® si rivela particolarmente efficace (quando usata correttamente). Generalmente, la riduzione del dolore si avverte durante un singolo trattamento, ma può verificarsi a distanza di ore da quest'ultimo o dopo una serie di trattamenti.

Electromedical Products International, Inc.

Una società specializzata di cui fidarsi



La Electromedical Products International, Inc. (EPI) è stata fondata nel 1981 dal dott. Daniel L. Kirsch, un neurobiologo di fama mondiale, il quale ha sviluppato una soluzione sicura ed efficace per il trattamento del dolore, del sonno e dei disturbi dell'umore con la tecnologia

Alpha-Stim®. Nel 2008, ha ricevuto il prestigioso premio Educatore del Dolore Richard S. Weiner, dall'Accademia Americana della Gestione del Dolore. La EPI ha ricevuto il premio Migliore Società nel 2009 nella categoria Strumenti Chirurgici e Medici dalla Associazione delle Piccole Attività Commerciali (SBCA). La EPI, assieme al proprio personale, è dedicata all'eccellenza nel trattamento e nella diagnosi dei problemi di natura medica e della salute.





Nel 2011, la EPI ha vinto il prestigioso premio "Distinzione e Innovazione" dall'Istituto Americano dello Stress in base alla crescente lista di pubblicazioni su riviste di revisione paritaria dimostranti la sicurezza e l'efficacia dei prodotti Alpha-Stim®.



Oggi, la EPI è una società internazionale con rappresentanti in tutto il mondo. E' un'azienda riconosciuta dall'FDA [Ente governativo per il controllo di alimenti e farmaci], le cui operazioni godono della certificazione ISO (International Standard Organization) 13485:2003, attribuita da un organismo terzo indipendente, attestante gli standard di qualità degli strumenti medici. I prodotti Alpha-Stim® si sono guadagnati e continuano ad avere il marchio CE per la conformità con le direttive europee sugli strumenti medici.

Cosa aspettarsi dai trattamenti

Sebbene la tecnologia Alpha-Stim® sia significativamente efficace per 9 persone su 10 che la usano correttamente, questa non funziona con tutti. Qualora non vi sia evidente

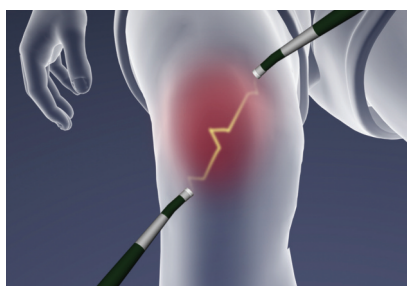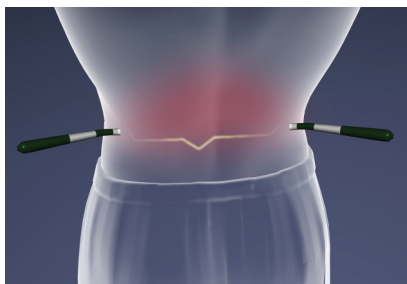

diminuzione del dolore, nonostante siano state provate diverse posizioni per le sonde, considerate la possibilità di trattare l'aria di dolore primario con un'impostazione di corrente minore di 1 o 2 (da 100 a 200 μ A) con gli elettrodi AS-Trode™ per 60 minuti o più. Se necessario, l'uso può essere ripetuto

tutto il giorno. In alcune persone, la frequenza 1,5 Hz può produrre risultati migliori, nella rara eventualità che la 0.5 Hz non produca effetti. Al fine di ottenere risultati, può anche essere necessario trattare tutte le zone del corpo in cui è presente il dolore. Qualora l'Alpha-Stim® non funzionasse bene, contattate il vostro medico curante, il distributore locale di Alpha-Stim® autorizzato o la EPI per ricevere supporto tecnico.

Generalmente, sia la riduzione dell'ansia che il controllo del dolore sono avvertiti durante un singolo trattamento,

ma ciò può verificarsi a distanza di ore da quest'ultimo. In genere, l'insonnia, che viene controllata tramite l'effetto di rilassamento, migliora dopo il trattamento iniziale, ma possono essere necessarie 3 settimane. Quindi, mentre la maggior parte delle persone può usarlo al momento di coricarsi e quando si sveglia durante la notte, alcune hanno notato di doversi sottoporre ai 20-60 minuti di trattamento CES con l'Alpha-Stim® almeno 3 ore prima di coricarsi, a



causa dell'elevato stato vigile conseguente al trattamento CES, che potrebbe interferire con il sonno. Può anche essere utilizzato al mattino per favorire un migliore sonno notturno.

Generalmente, la depressione richiede 3 o più settimane di trattamento quotidiano per notare un miglioramento significativo, ma può essere necessario più tempo. Una volta che la condizione è sotto controllo, generalmente è sufficiente utilizzare l'Alpha-Stim® per 2-3 volte a settimana, o meno, per mantenere i buoni risultati.

L'Alpha-Stim® può essere utilizzato in aggiunta ai farmaci, alla psicoterapia o altri trattamenti. Potrebbe essere necessario ridurre alcuni farmaci sotto la supervisione di un medico, poiché la CES potrebbe aumentare l'effetto dei farmaci prescritti. Durante l'uso della CES, è necessario monitorare i farmaci.

Caratteristiche del prodotto Alpha-Stim®

Indicazioni principali

Dolore

Ansia

Insonnia

Depressione

Metodi di trattamento

Sonde intelligenti per il dolore

Elettrodi per il dolore

Clip da orecchio per la CES

In aggiunta

Cinque (5) anni di garanzia

Supporto clinico e tecnico gratuiti

In genere, in seguito al trattamento, non insorgono limitazioni fisiche, sicché la maggior parte degli utenti è in grado di riprendere immediatamente le normali attività. Alcuni utenti potrebbero provare un senso di euforia, o di rilassamento, che può compromettere temporaneamente le loro capacità mentali e/o fisiche per l'esecuzione di attività potenzialmente pericolose, come la guida di un veicolo a motore o l'esercizio di macchinari pesanti, fino a diverse ore dopo il trattamento.

Non sono stati segnalati effetti collaterali permanenti. Sporadicamente, potrebbero verificarsi mal di testa, disagi o irritazioni cutanee sotto gli elettrodi, oppure capogiri. Qualora si dovesse avvertire una sensazione di pesantezza, continuare il trattamento per almeno 2 minuti dopo che questa sia scomparsa. Durante il trattamento sulla testa, alcune persone vedranno delle luci lampeggianti a causa della stimolazione del nervo ottico. Per un po' di tempo, in seguito al trattamento, qualcuno potrebbe avvertire il sapore metallico delle otturazioni dentali. Tutte queste sono reazioni minori e autolimitanti.

Alpha-Stim® M

Per il trattamento di zone dolorose multiple, ansia, insonnia e depressione.

Alpha-Stim® AID

Per il trattamento di ansia, insonnia e depressione, in assenza di dolore.



Scegliete l'Alpha-Stim® adatto a voi

La tecnologia Alpha-Stim® è disponibile in due dispositivi terapeutici facili da usare, sia per uso domiciliare che ambulatoriale. Vedere la tabella sopra.

L'Alpha-Stim® M fornisce sia elettroterapia a microcorrente (MET) che stimolazione elettroterapica craniale (CES) tramite cui tratta dolore, ansia, insonnia e depressione. L'Alpha-Stim® M è il prodotto più completo e versatile, e l'unica scelta per il trattamento del dolore così come l'ansia, l'insonnia e la depressione. L'Alpha-Stim® M viene fornito completo di sonde ed elettrodi AS-Trodes™ autoadesivi per il trattamento del dolore, e clip per le orecchie per la somministrazione della CES.



L'Alpha-Stim® AID fornisce stimolazione elettroterapica craniale (CES) per chi soffre di ansia, insonnia e/o depressione senza dolore e viene venduto completo di clip per le orecchie per la somministrazione della CES.



Come ottenere un Alpha-Stim®?

1. Negli Stati Uniti è necessario chiedere al proprio medico se l'Alpha-Stim® è appropriato per la propria situazione, quindi ottenerne una prescrizione.*

2. Andare su www.alpha-stim.com o chiamare l'(800) 367-7246 da Stati Uniti e Canada per ordinare il proprio Alpha-Stim® o per sapere dove si trova il distributore locale. Fuori dagli USA chiamare il +1.940.328.0788 o inviare una e-mail a info@epii.com.

5 anni di garanzia limitata

La garanzia di ogni Alpha-Stim® AID ne garantisce l'assenza di difetti di materiali e di costruzione per un periodo di cinque anni dalla data d'acquisto (escluse batterie e accessori) a patto che il prodotto venga usato in condizioni normali. Leggere il manuale d'istruzioni per tutti i dettagli.

Specifiche tecniche dell'Alpha-Stim® M

Elettriche


Batterie	2 AA da 1,5 volt (incluse).
Timer	Sonda intelligente ad attivazione tramite contatto cutaneo con timer di 10 secondi; auto-spegnimento con conto alla rovescia da 20, 40 o 60 minuti; e timer continuo indicante il tempo trascorso.
Corrente elettrica	Da 0 a 600 microampere (μ A)
Frequenza	0,5; 1,5; o 100 Hz (impulsi al secondo) combinata con una costante da 0,4 Hz. L'impostazione piú comune di 0,5 Hz, comporta un tasso medio di ripetizione degli impulsi di 0,8 Hz.
Larghezza d'impulso Carica per impulso	Varianti tra 0,25; 0,5; 0,75 e 1 secondo a 0,5 Hz. A 600 μ A e 0,5 Hz la carica per impulso varia tra 150, 300, 450 e 600 microcoulomb (μ C). Ogni 10 secondi, la carica totale è di 1,5 millicoulomb (mC) in ogni direzione.

*Nota: L'Alpha-Stim® è regolarmente autorizzato nella maggior parte del mondo. Negli Stati Uniti ha l'autorizzazione da parte dell'FDA per la commercializzazione interstatale effettuata da un operatore sanitario con regolare licenza, o simile. Al di fuori degli USA è disponibile senza prescrizione medica.

Forma d'onda La gamma d'impedenza all'interno della quale i parametri della forma d'onda rimangono validi va da 100 Ω a 10 K Ω . La forma d'onda è composta da onde rettangolari asimmetriche bipolari con un ciclo di lavoro al 50% che, a 0,5 Hz, si ripete periodicamente a intervalli di 10 secondi. La forma d'onda è equilibrata per ottenere una corrente netta pari a 0 in ogni direzione (vedi grafico).

Componenti meccaniche

Altezza 11,0 cm
Larghezza 7,2 cm

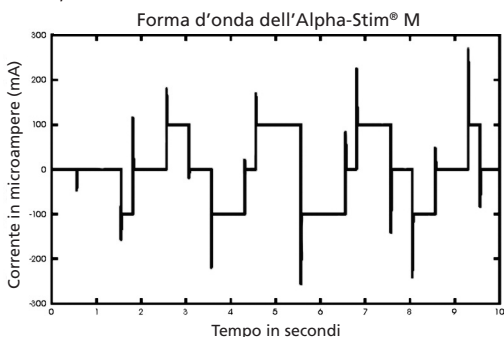

Profondità 2,1 cm senza clip per la cintura
Peso 152 g comprese le batterie

Fabbricato in Cina in base alle esatte specifiche della EPI, USA.

L'Alpha-Stim® M è venduto completo e pronto all'uso con 1 set di elettrodi a clip da orecchio, 1 flacone da 15 ml di Alpha Conducting Solution™ (sono disponibili flaconi ricarica da 250 ml), 2 set di cavi per 4 elettrodi, 2 sonde intelligenti, 4 elettrodi a marchio AS-Trode™ autoadesivi d'argento riutilizzabili per uso singolo (adatti per essere usati, approssimativamente, da 2 a 4 settimane), 100 elettrodi sonda a piastra (PEP™), 256 elettrodi a piastra per le clip da orecchio (EEP), ma-nuale di istruzioni illustrato, DVD istruttivo, laccetto, custodia, e 2 batterie AA. Questo è tutto il necessario per iniziare a utilizzare il vostro nuovo Alpha-Stim® M. Per i rifornimenti di Alpha Conducting Solution™, la sostituzione degli elettrodi a marchio AS-Trode™, dei PEP™ e degli EEP, usare soltanto prodotti a marchio Alpha-Stim® autorizzati.



Informazioni sulla prescrizione

La EPI è certificata ISO

La Electromedical Products International, Inc. è un'organizzazione con certificazione ISO (International Standards Organization). La ISO è un'organizzazione internazionale che lavora con circa 140 paesi e le Nazioni Unite per mantenere gli standard per tutte le applicazioni tecnologiche per l'industria globale. I requisiti per il settore dei dispositivi medici si riferiscono ai controlli di progettazione, gestione dei rischi, controlli ambientali, processi speciali (ad esempio: i software di validazione), tracciabilità, conservazione dei dati e azioni normative quali la vigilanza.

Interferenza elettromagnetica

Questo apparecchio è stato testato indipendentemente da agenzie esterne ed è risultato conforme ai limiti del Comitato Internazionale Speciale per le Perturbazioni Radioelettriche (CISPR). Questi limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in ambiente residenziale o clinico. Tuttavia, in particolari condizioni, possono comunque verificarsi delle interferenze. Qualora ciò accada, aumentare la distanza tra il dispositivo e l'apparecchiatura con cui interferisce. Se il problema persiste, consultare la Electromedical Products International, Inc.

Dichiarazione di conformità CE per l'Europa

L'Alpha-Stim® M è un dispositivo medico di classe IIa, tipo BF. È stato testato indipendentemente da agenzie esterne per fornire garanzia di conformità agli standard vigenti per la sicurezza delle apparecchiature medicali e la compatibilità elettromagnetica.

Avviso per gli Stati Uniti

La legge federale (solo USA) consente che il dispositivo sia venduto esclusivamente da un operatore sanitario con regolare licenza, o simile. Al di fuori degli Stati Uniti, è disponibile a livello mondiale senza prescrizione, ma è raccomandata la consultazione di un operatore sanitario qualificato.

Indicazioni

L'Alpha-Stim® M è un trattamento efficace con ampie applicazioni per una varie sindromi che comportano dolore e sia l'Alpha-Stim® AID che l'M sono utilizzati per la gestione di ansia, insonnia e depressione, o per il sollievo a breve termine dei sintomi associati a tali indicazioni. In molti casi, l'Alpha-Stim® è l'unica terapia necessaria. Sono stati raggiunti risultati efficaci nella gestione del dolore durante e/o consequenzialmente alla stimolazione delle parti del corpo affette, delle aree adiacenti e distanti da quelle doloranti. Come per qualsiasi intervento terapeutico, non tutti gli individui rispondono all'Alpha-Stim®. Il grado di efficacia varierà con la natura del problema trattato, la salute generale dell'individuo e il metodo di trattamento. Può essere necessario fino a un mese di prova iniziale, prima di notare significative riduzioni dei sintomi.

Controindicazioni

L'Alpha-Stim® può influire sul funzionamento di pacemaker cardiaci sincroni e impianti defibrillatori. Non stimolare gli occhi direttamente, né premere le sonde sul seno carotideo (sul collo vicino la laringe).

Precauzioni

Solo per uso esterno. Non lasciare che i bambini utilizzino o maneggino questi dispositivi senza la supervisione di un adulto. Non utilizzare macchinari potenzialmente pericolosi o veicoli durante il trattamento e, in alcuni casi, per diverse ore dopo il trattamento, qualora l'utente provi un rilassamento profondo. Si consiglia cautela nei casi in cui non verrebbero usate altre forme di analgesia (controllo del dolore); come la resistenza al dolore per scopi diagnostici o in persone che potrebbero abusare delle aree in cui il dolore è sotto monitoraggio. La sicurezza della stimolazione durante la gravidanza non è stata dimostrata. Ci sono state segnalazioni di un abbassamento della pressione sanguigna nei pazienti ipertesi in seguito alla CES. Negli individui che assumono farmaci per la pressione sanguigna, quest'ultima dev'essere tenuta sotto controllo e il dosaggio del farmaco dovrebbe essere diminuito dal medico curante, se necessario.

Effetti avversi

Gli effetti avversi sono generalmente lievi e autolimitanti. In base ai rilevamenti effettuati su circa 8.800 pazienti che hanno partecipato a 144 studi controllati, studi clinici pubblici, condizioni non controllate e in base a sondaggi sottoposti a dei medici, gli effetti avversi ragionevolmente associabili all'uso della CES sono: vertigini (6 casi, 0,07%), irritazioni cutanee/bruciature da elettrodo (6 casi, 0,07%) e mal di testa (9 casi, 0,10%). Il trattamento prolungato a base di CES con correnti di potenza superiore al necessario può causare vertigini e nausea che possono durare per ore o giorni. Qualora il trattamento venga effettuato prima di andare a dormire, è possibile avere difficoltà ad addormentarsi a causa della maggiore vigilanza. Raramente, possono presentarsi degli effetti paradossali come stati di iper-eccitazione, aumento di ansia e disturbi del sonno.

Qualora l'Alpha-Stim® non riuscisse a mettere sotto controllo il dolore, l'ansia, l'insonnia o la depressione entro un mese, consultate il vostro medico curante, il distributore autorizzato dell'Alpha-Stim® o la EPI per ricevere assistenza.

Prodotto e commercializzato da:

Electromedical Products International, Inc.

2201 Garrett Morris Parkway/Mineral Wells, Texas 76067-9034 USA

Tel: 1.800.367.7246 negli USA e CANADA, o 940.328.0788

Fax: 940.328.0888 / E-Mail: info@epii.com

Rappresentante autorizzato per l'Unione Europea:

EC REP

MediMark Europe

11, rue Émile Zola – BP 2332/38033 Grenoble Cedex2– Francia

Tel: +33 (0)4 76 86 43 22 / Fax: +33 (0)4 76 17 19 82

E-mail: medimark@easynet.fr

www.alpha-stim.com



epi

ELECTROMEDICAL
Products International, Inc.



© Copyright 2012 by Electromedical Products International, Inc.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI Alpha-Stim® è un marchio registrato presso l'US
Patent and Trademark Office and Worldwide Patents Pending.



Apparecchiatura di tipo
B. Questo stimolatore è
alimentato esclusivamente
dall'interno.



Verdere le istruzioni
per l'uso. Leggere il
manuale nella sua
integrità prima
dell'uso.